

**Mascarilla de protección**  
**Instructivo de armado**

Piezas:

- 1.- Careta principal
- 2.- Soporte interior de careta
- 3.- Elástico



1 Alinee el soporte interior de la careta con la parte superior introduciendo las pestañas en los orificios de la careta principal en ambos extremos de la misma



2 Elabore un nudo en uno de los extremos del elástico



3 Tome el extremo de la careta principal por uno de los lados y introduzca el extremo del elástico en el primer orificio superior. Siga la imagen, de izquierda a derecha, pasando en zigzag por los siguientes orificios



4 Haga pasar todo el elástico hasta que el nudo tope en el extremo de la mascarilla.



5 Haga pasar el elástico por el otro extremo de la mascarilla justo como en el paso No 3



6 Una vez que el elástico se encuentre ajustado en ambos extremos mídalo en la cabeza del usuario para ajustar el tamaño y en base a este haga un nudo en el extremo exterior del elástico para fijarlo



7 503017 714869


**Fabricante:**  
*Distribuciones y Proyectos S.A. de C.V.*  
*Dr. J Velasco No. 193-203 Col. Doctores C.P. 06720*  
*Tel: (52-55) 5578 0541 / atclientes@dprMexico.com*

**[www.dprMexico.com](http://www.dprMexico.com)**

## Mascarilla de protección Instructivo de armado

Piezas:


- 1.- Careta principal
- 2.- Soporte interior de careta
- 3.- Elástico

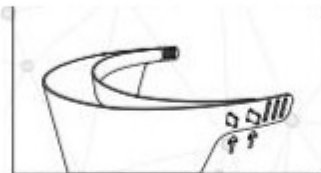


1 Alinee el soporte interior de la careta con la parte superior introduciendo las pestañas en los orificios de la careta principal en ambos extremos de la misma




2 Elabore un nudo en uno de los extremos del elástico.

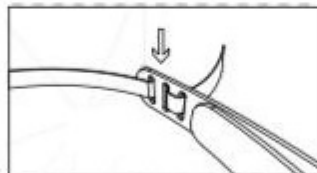

3 Tome el extremo del elástico sin nudo e introdúzcalo en uno de los extremos de la mascarilla haciéndolo pasar por el primer orificio como se muestra en la imagen, después hágalo pasar en zigzag por los siguientes dos orificios.

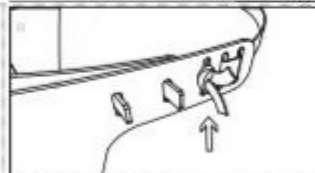

4 Haga pasar todo el elástico hasta que el nudo tope en el extremo de la mascarilla.

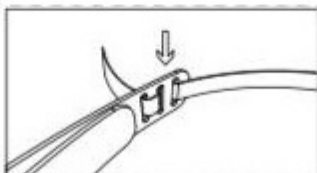


5 Haga pasar el elástico por el otro extremo de la mascarilla justo como en el paso No 3



6. Una vez que el elástico se encuentre ajustado en ambos extremos médalo en la cabeza del usuario para ajustar el tamaño y en base a este haga un nudo en el extremo exterior del elástico para fijarlo



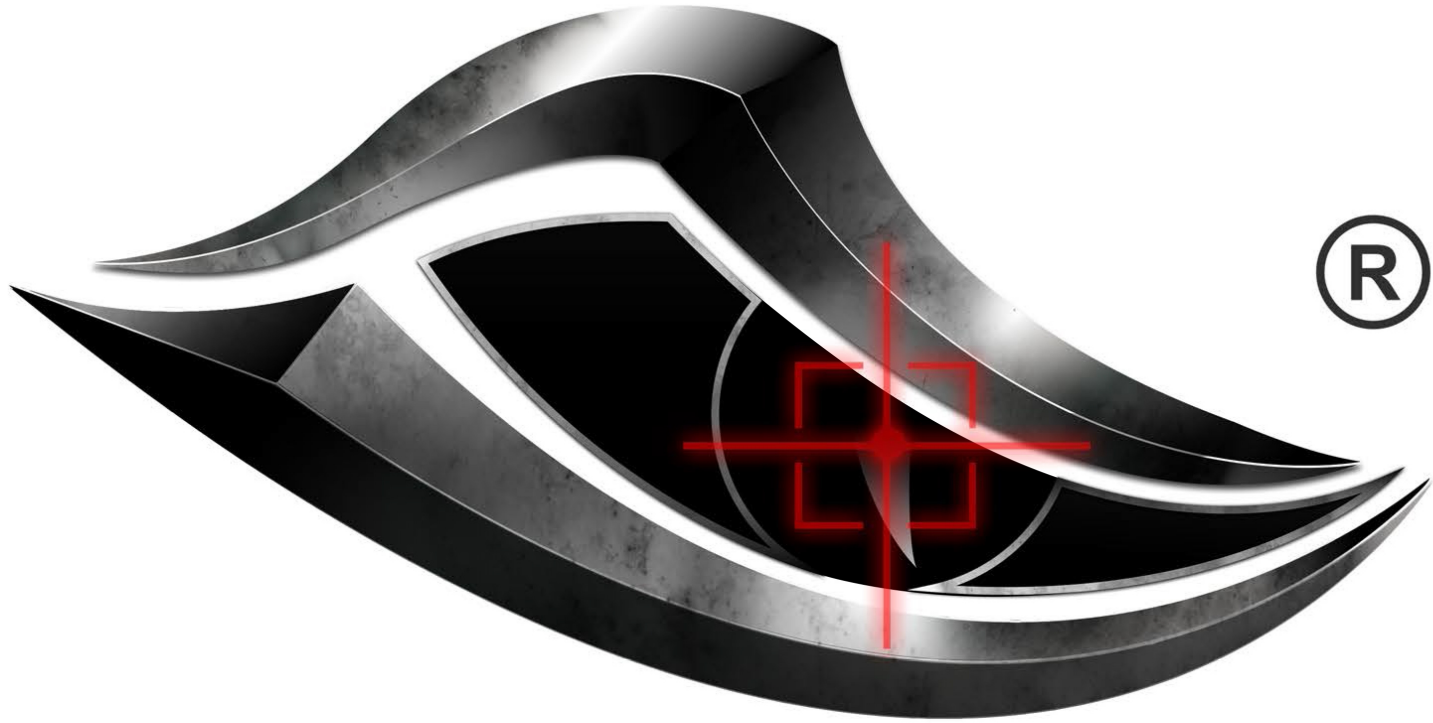

**KomodoDragon**